

# VISIRING


## Anillos de Tensión Capsulares



NOT AVAILABLE FOR SALE IN THE U.S.




VisiRing I0

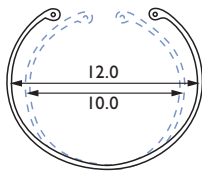

**Diámetro TOTAL:** 12mm  
**Diámetro CERRADO:** 10mm

VisiRing I1

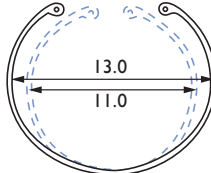

**Diámetro TOTAL:** 13mm  
**Diámetro CERRADO:** 11mm

### VENTAJAS

- Mantiene condiciones estables durante la cirugía
- Expansión circular de la bolsa capsular
- Previene la Fibrosis Capsular
- Permite la centralización del LIO aun cuando los "zonules" están dañados o ausentes

### INDICACIONES

- "Subluxation" de LIO
- Con el uso de LIO blandos
- "Zonules Dañados", por ejemplo casos de "Pseudoexfoliatio lentis", o grados distintos de desgaste a causa de la vejez

### PRECAUCIONES

- Una de las puntas del anillo capsular de tensión puede enredarse con la bolsa "fornix." Esto se observa en la formación de pliegues de tracción de la cápsula posterior. Si la punta es forzada puede llegar a perforar la cápsula.
- Estos enredamientos pueden suceder más frecuentemente en anillos de cápsulas de tensiones grandes o rígidas. La condición se puede evitar utilizando medidas adecuadas y con el uso de sustancias elásticas de alta viscosidad.



VISIONARY MEDICAL SUPPLIES, INC.  
SUTURES, IOLS, OPHTHALMIC SOLUTIONS, AND MORE

6441 Enterprise Lane, Madison, WI 53719 USA

TEL: 608-270-3880

FAX: 608-270-3882

[www.visionarymedicalsupplies.com](http://www.visionarymedicalsupplies.com)